


# RAMPY I POCHYLNIE

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

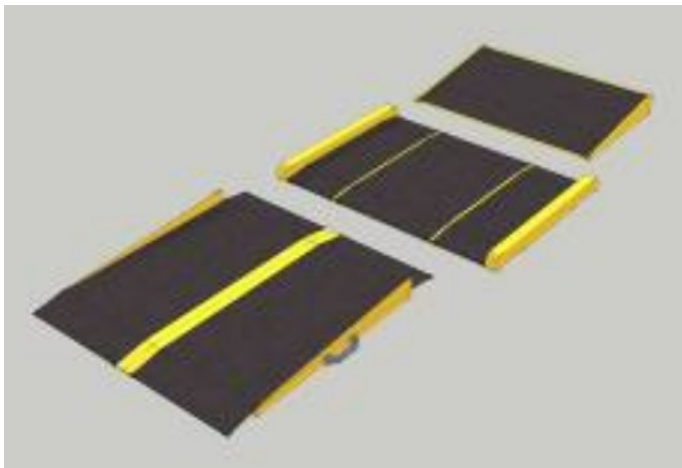

Rampa Progowa z włókna szklanego  
Standardowa Rampa z włókna szklanego  
Przenośna Rampa aluminiowa (aktówka)

### OPIS

Pochylnie ułatwiają mobilność osób niepełnosprawnych. Nasze rampy są zaprojektowane tak, aby przekraczać obowiązujące przepisy DDA. Wszystkie rampy są produkowane zgodnie z normami ISO 9001, dzięki czemu można mieć pewność, że każda rampa jest najwyższej jakości. Rampy z włókna szklanego i aluminium, są niezbędne do pokonania barier fizycznych w Państwa siedzibie dla osób niepełnosprawnych. Pochylnie są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem do pokonywania tych barier.

### CHARAKTERYSTYKA POCHYLNI

- Antypoślizgowa powierzchnia górna
- Spełnia regulaminu DDA
- Przenośne i składane
- Wysokiej jakości włókno szklane i aluminium
- Ochrona nawierzchni toru przed poślizgiem
- Duża nośność
- Lekkie

### ZASTOSOWANIE POCHYLNI

- Wejście do budynku prywatnego
- Wejście do budynku handlowego
- Wyjścia przeciwpożarowe
- Schody wewnętrzne
- Schody zewnętrzne

### RAMPY TYPOWE DANE TECHNICZNE

**Opis:** Próg z włókna szklanego, Standardowa i Aluminiowa.

**Wykończenie:** Antypoślizgowa powierzchnia

## KOLORY STANDARDOWE RAMP

<b>Rampa Progowa:</b>	chropowata górna powierzchnia z żółtą ramą z włókna szklanego.
<b>Standard:</b>	chropowata górna powierzchnia z żółtą ramą z włókna szklanego.
<b>Aktówka aluminium:</b>	chropowata górna powierzchnia z żółtą ramą aluminiową.

## MATERIAŁY RAMP

Rampy progowe:

Z włókien szklanych (GRP), ramy z węgla i silikonowy żwir górnej powierzchni.

Standardowe rampy:

Z włókien szklanych (GRP), ramy z węgla i silikonowy żwir górnej powierzchni.

Rampy Aluminium:

Aluminiowe ramy, lakierowane proszkowo żółte z zabezpieczeniem przeciw poślizgowym powierzchni górnej.

## Specyfikacja Ramp

Rampa Progowa z włókna szklanego					
Rozmiar:	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Szerokość wewnętrzna (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Waga (kg)
Małe	75	450	760	760	3,5
Średnie	100	450	760	760	4
Duże	125	450	760	760	4,25

Rampa Standardowa z włókna szklanego					
Rozmiar:	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Szerokość wewnętrzna (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Waga (kg)
Małe	-	600	800	875	5
Średnie	-	900	800	875	8
Duże	-	1200	800	875	10

Przenośna Rama Aluminium					
Rozmiar:	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Szerokość wewnętrzna (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Waga (kg)
Małe	-	600	750	760	6
Średnie	-	900	750	760	7
Duże	-	1200	750	760	9
Wielkie	-	1500	750	760	12

Możliwości obciążenia: 250 kg, 300 kg Aluminiowa Rampa z włókna szklanego

Żywotność produktu: 10 + lat (w zależności od analizy ruchu)

Ogólne zastosowanie: Ruch pieszych, wózki inwalidzkie / ruch skuterów

## **ZALETY**

### **Antypoślizgowa powierzchnia**

Wszystkie rampy zawierają standardową warstwę żwiru na górnej powierzchni zapewniającą doskonałą przyczepność nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Ważnym czynnikiem danej rampy są powszechnie możliwe do stosowanie na zewnątrz.

### **Wysokiej jakości materiały**

W przypadku wybierania rampy albo z włókna szklanego lub aluminium można mieć pewność, że oba zestawy ramp wykonane są z bardzo wysokich materiałów zapewniających długą żywotność produktów nawet w aplikacjach zewnętrznych.

### **Duża nośność**

Przy rosnącej liczbie pojazdów silnikowych dostęp na rynku, czasami o wadze do 100 kg, wysokiej jakości konstrukcje rampy są w stanie poradzić sobie z obciążenia do 300 kg.



### **Pochylnie Czyszczenie Przewodnik i porady**

- Choć pochylnie są niezwykle odporne na zabrudzenia, możliwe jest, jak w większości innych rzeczy, pojawienie się zabrudzenia.
- Brud i zanieczyszczenia można łatwo usunąć za pomocą twardej szczotki i czynności te powinny być przeprowadzane regularnie.
- Jeśli pochylnie zostały poddane wyciekom lub zanieczyszczeniom stałych osadów, mogą być użyte detergenty. Zawsze wskazane jest, aby przetestować każdy produkt czyszczenia pochylni przed przystąpieniem do czyszczenia. Można to zrobić w mało widocznym obszarze produktu.
- Używając detergentu, ciepłej wody i odpowiedniej szczotki szorować powierzchnię aż będzie czysta nadmiar wody można usunąć używając mokrego/suchego odkurzacza lub odpowiednich chłonnych materiałów
- W przypadku, gdy okoliczności na to pozwalają, rampy mogą być czyszczone ciśnieniowo bez niszczenia ich.

### **Ogólne Konserwacja rutynowa**

Bezpieczeństwo pochylni powinno być sprawdzane na bieżąco. Okoliczności będą się różnić, w oparciu o wielkości zużycia, ale wskazane są co miesięczne kontrole.



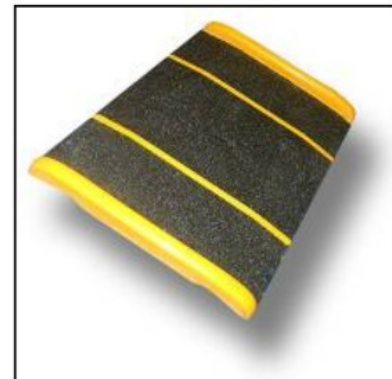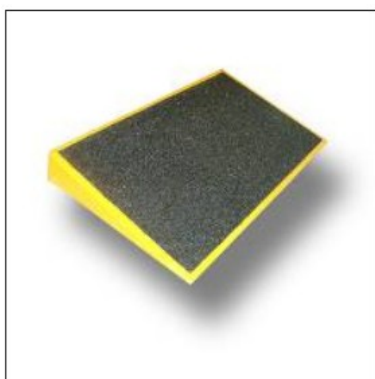

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

